


АероЧамбер Плюс Спейсер

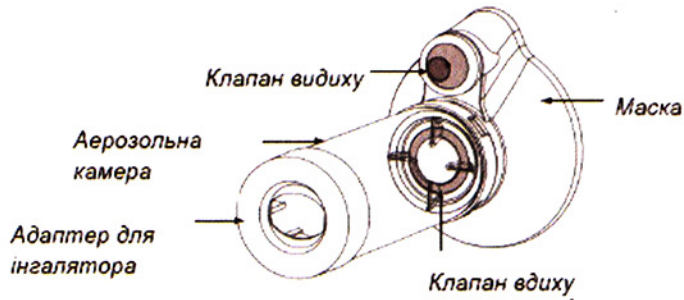

Складові частини спейсера:

1. Адаптер для інгалятора (зйомний)
2. Аерозольна камера
3. Клапан вдиху
4. Клапан видиху (дозволяє видихати повітря не знімаючи маску з обличчя)
5. Маска

Спейсер може бути 2-х видів:

АероЧамбер Плюс	з маскою для дітей: (12 місяців-5 років)
АероЧамбер Плюс	з маскою для немовлят: (0-18 місяців)

Попередження:

- Будь ласка ознайомтесь з правилами користування спейсером перед першим використанням. Якщо у Вас виникли труднощі або питання з приводу використання спейсера, зверніться до Вашого лікаря
- Зберігайте спейсер у захищеному від дітей місці. Не дозволяйте дитині гратися зі спейсером або користуватися ним без нагляду дорослих.
- Не від'єднуйте складові частини спейсера, окрім адаптера для інгалятора, під час миття.
- Через 24 місяці при постійному використанні, спейсер слід замінити

Спейсер АероЧамбер Плюс призначений для введення ліків у вигляді інгаляцій. Використання спейсера АероЧамбер Плюс забезпечує потрапляння точної дози лікарського засобу у дихальні шляхи під час кожної інгаляції.

1	2	Як користуватись спейсером АероЧамбер Плюс	Як доглядати за спейсером АероЧамбер Плюс
		<p>Уважно перевірте спейсер на відсутність пошкоджень або сторонніх предметів. Будь-який сторонній предмет має бути видалений зі спейсера. Перевірте спейсер на наявність усіх складових частин. Якщо було виявлено будь-яке пошкодження або відсутність однієї чи декількох частин, спейсер необхідно замінити.</p>	<p>Необхідно вимити спейсер перед першим використанням. Після цього регулярно мити спейсер один раз на тиждень.</p>
		<p>Зніміть кришку з мундштука інгалятора.</p>	<p>Від'єднайте адаптер для інгалятора. Не від'єднуйте маску та клапани. Покладіть спейсер з відокремленим адаптером у теплу розведenu миючим засобом воду на 15 хвилин.</p>
		<p>Струсніть інгалятор. Вставте мундштук інгалятора в адаптер.</p>	<p>Ретельно промийте спейсер теплою водою. Не витирайте насухо. Струсніть залишки води зі спейсера.</p>
		<p>Обережно та щільно притисніть маску до обличчя.</p>	<p>Залиште спейсер при кімнатній температурі у вертикальному положенні до повного висихання.</p>
		<p>Натисніть на інгалятор 1 раз та повільно вдихніть. Тримайте маску притисненою до обличчя протягом 6 вдихів після натискання на інгалятор. Після цього обережно зніміть маску з обличчя.</p>	
		<p>Дотримуйтесь доз та інтервалів між інгаляціями згідно інструкції або призначення Вашого лікаря. Під час натупних інгаляцій виконуйте дії описані в пунктах 2, 3, 4, 5.</p>	<p>Після повного висихання знову приєднайте адаптер для інгалятора.</p>

Виробник: „Trudell Medical International”

Адреса: 725 Third Street, London, Ontario, Canada N5V 5G4

Зареєстровано в Україні № 7365/2007